

Bioeasy B. Brucella Ab Kit de prueba rápida

CÓDIGO DE ORDEN: YR1A1001K

Introducción

Bioeasy Prueba Rápida para anticuerpo de *Brucella* se basa en la tecnología de Inmunocromatografía coloidal de oro, utilizada para la detección de anticuerpos de *Brucella* en muestras de sangre, plasma, suero de bovino, oveja, cabra o leche cruda.

Esta prueba toma aproximadamente 3 minutos.

Aplicación

Detección de anticuerpos de *Brucella* en muestra de sangre, plasma, suero de bovino, oveja, cabra o leche cruda.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar de 2-8°C (fuera de la luz del sol y la humedad, mantenerse sellado, no congelar).

Vida útil de 12 meses.

Componentes del kit de prueba


1. 25 bolsas/kit, 1 cassette de prueba/bolsa.
2. 1 botella de solución de diluyente.
3. 1 manual de instrucciones.

Procedimiento de prueba

1. Saque el cassette de prueba, colóquelo en un lugar plano y limpio para su uso.
2. Pipetee 5 µL de suero, plasma, o 10 µL de muestra de leche en el pocillo de S. (Nota: Este paso es crítico, la muestra no debe ser excesiva), luego agregue dos gotas de solución diluyente.
3. Incube 3 minutos a 20-40°C.
4. Interprete el resultado al final de 3 minutos, los resultados después de más de 5 minutos son sólo para referencia.

Interpretación de los resultados

Interpretación del diagrama

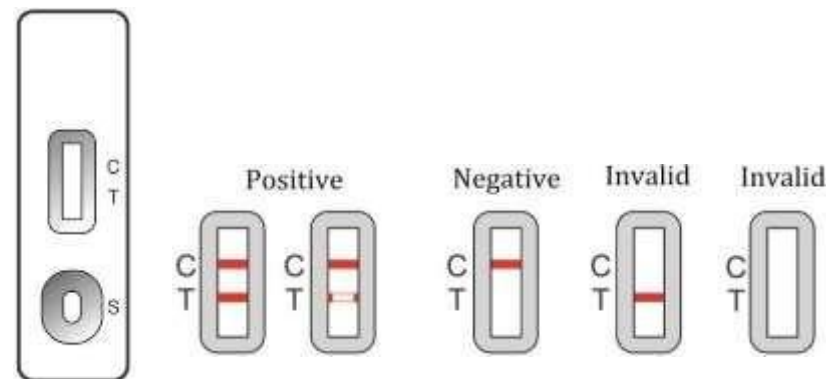

Positivo: línea C y línea T presente, independientemente de la intensidad del color.

Negativo: la línea C está presente, ausencia de la línea T.

Inválido: si no hay una línea C visible, la prueba se considera inválida.

Precauciones

1. Si compró productos vencidos, dañados o contaminados, reemplace al proveedor.
2. Este producto solo se emplea para una prueba individual, no lo reutilice.
3. No use el diluyente que no se suministre en el kit.
4. No use agua de grifo, agua purificada ni agua destilada como control negativo.
5. En estricto acuerdo con las instrucciones de uso.
6. Las muestras pueden ser potencialmente infecciosas, las muestras y los reactivos usados deben tratarse como riesgos microbiológicos.
7. Este producto solo se utiliza como prueba cualitativa de detección preliminar, para un diagnóstico posterior, combine con síntomas clínicos u otras pruebas de rutina.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd.

ADD: No. 2-1, 1st Liuxian Street, Xin'an Road,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong,
China, 518101

TEL: +86-4001111126 / +86-755-27948546

FAX: +86-755-27948417

Email: info@bioeasy.com

Web: www.bioeasy.com

SUDMILK CIA.LTDA.

Quito-Ecuador

ADD: Pifo – Ignacio Fernández Salvador
Oe2-164 / Av. Interoceánica.

TEL: +593995851691

Email: info@sudmilk.com

Web: www.sudmilk.com